

MINIMED® 640G -JÄRJESTELMÄN PIKAOHJE

Medtronic

Tässä pikaohjeessa on tiedot tärkeimmistä toiminnoista. Tarkemmat tiedot tuotteen käytöstä löydät MiniMed® 640G -järjestelmän käyttöoppaasta.



Näppäinlukituksen avaaminen/Pumpun asettaminen lepotilaan (näppäimet lukittuvat)

Siirtyäksesi Perusnäytöstä eteenpäin pumpun oltua lepotilassa, avaa näppäinlukitus painamalla näytöllä osoitettua nuolipainiketta.

Asetaaksesi pumppu lepotilaan ja lukitaksesi näppäimet, pidä Valikkonäppäin alapainettuna kunnes näyttö sammuu.

Tilanäyttö

Korostamalla Tilapalkin ja painamalla Valintanäppäintä pääset Tilanäyttöön, josta löydät tiedot pumpun viimeisimmistä tapahtumista ja tilasta.

Boluksen antaminen (Bolus Wizard™)

Pumpusta: Valitse *Bolus* – valitse *Bolusopas* – syötä VS – syötä HH-määrä ja valitse *Seuraava*. Valitse *Annostele bolus*.

Mittarista: Käynnistä mittari – valitse *Bolus* – Valitse *Manuaalinen* tai *Esiasetettu bolus*.

Boluksen pysäyttäminen

Bolusannostelun käynnistyttyä valitse *Pys. bolus* ja valitse *Kyllä*. Annosteltu määrä näkyy pumpun näytössä ja löytyy myös Tilan pikanäytöstä.

Väliaikainen basal

Valitse *Basal* – valitse *Väliaik. basal* – syötä kesto ja valitse *Seuraava*. Valitse prosentit ja sen jälkeen valitse *Aloita*.



Väliaikaisen basalin peruuttaminen

Peruuta väliaikainen basal valitsemalla *Basal* – valitse *Peruuta väliaik. basal*.




Hälytysten ja varoitusten kuittaaminen

Lue näytöllä näkyvä teksti ja tee tarvittavat toimenpiteet.
Paina Nuoli alas -näppäintä.
Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina Valintanäppäintä.

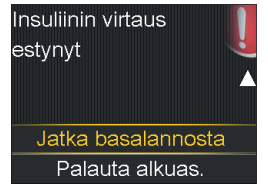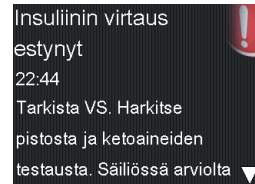

Lukitustila (lapsilukko)

Pumpun voi lukita valitsemalla valikosta *Apuohjelmat – Lukitus* – kytke päälle valitsemalla *On* ja *Tallenna*. Tilapalkissa näkyy lukkokuvake.
Pumpun asetuksia ei voi muuttaa eikä bolusta voi annostella (ainoastaan etäboluksen, mikäli ominaisuus on aktivoituna).
Lukitus avataan valikon kautta valitsemalla *Lukitus* – valitse *Ei* ja *Tallenna*.

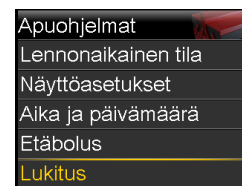

SmartGuard – Automaattinen annostelun pysäytys

Pumppu voi pysäyttää insuliiniannostelun automaattisesti ennakoitaessa glukoositason saavuttavan matalan glukoosin rajan. Pumppu käynnistää annostelun automaattisesti glukoositason noustessa jälleen riittävälle tasolle.

Mikäli tarvitaan bolusannos, kun annostelu on pysäytetty, käynnistä insuliiniannostelu valitsemalla perusnäytöstä *Pysäytetty ennen mat. -* tai *Pysäytys, kun mat. -* vaihtoehto ja noudata näytön ohjeita.



Pysäytys ennen mat. - tai Pysäytys, kun mat. -toiminto on päällä ja valmiina. Jos jompikumpi pysäytyksistä aktivoituu, kuvake vilkkuu ja insuliinin annostelu pysäytetään.




Pysäytys, kun mat. - tai Pysäytys, ennen mat. -toiminto on päällä, mutta toiminto ei ole käytettävissä. Tämä voi johtua äskettäisestä pysäytyksestä tai siitä, että sensorin glukoosiarvoja ei ole saatavilla.


Sensorin kalibrointi

Sensori tulee kalibroida vähintään 2 kertaa vuorokaudessa. Kun pumppu pyytää kalibrointia, mittaa verensokeri ja kun näytössä lukee *Kalibroidaanko sensori? – valitse Kyllä*.

Huom! Verensokeriarvoa EI tule käyttää kalibrointiin jos sensorinäytössä on 2 tai 3 nuolta. Pumppu hyväksyy kalibrointiin arvot välillä 2,2-22,2 mmol/l.

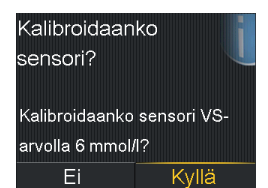

Sensorin näytön lukeminen

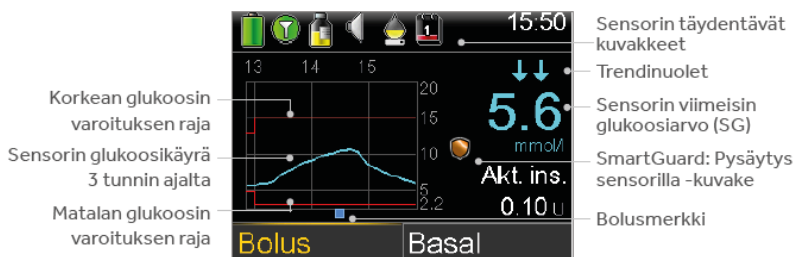

Tuotetuki 24 h, puh. 0800 164 064, produktssupport.diabetes@medtronic.com