

# MINIMED™ 640G -VALIKKOKARTTA



Perusnäyttö

Paina

Annostelun pysäytys
Ääniasetukset
Historia
Säiliö ja letku
Insuliniasetukset
Sensorin asetuks
Tapahtumamerkit
Muistutukset
Apuohjelmat

Annostelun pysäytys
---------------------

Ääniasetukset
Ääni
Ääni ja värinä
Värinä
Voimakkuus

Historia
Yhteenveto
Vrk-historia
Hälytyshistoria
SG-arvojen tarkastelu*
ISIG-historia*

Säiliö ja letku
Uusi säiliö
Kan. täyttö

Insuliniasetukset
Bolusoppaan asetukset
Basalmalliasetukset
Esiaset. väliaik. aset.
Esiaset. boluksen aset.
Yhdistelmä/jatkettu
Boluslisäys
Maksimibasal/-bolus
Helppo bolus
Autom. pysäytys
Bolusnopeus

Sensorin asetuks
Sensori
Sensoryhteydet*
Varoitusten vaiennus*
Kork. gluk. asetuks.*
Mat. gluk. asetukset*
Sensorin kalibrointi*
Autom. kalibrointi*

Tapahtumamerkit
VS
Pistos
Ateria
Liikunta
Muu

Muistutukset
Henkilökohtainen
Bolus-VS-tarkistus
Unohd. ateriabolus
Vajaa säiliö
Setin vaihto
Kalibrointi*

Apuohjelmat
Lennonaikainen tila
Näyttöasetukset
Aika ja päivämäärä
Etäbolus
Lukitus
Itsetestaus
HH-yksikkö
Asetusten hallinta
Sensordemo
Laittevaihtoehdot
Kieli

## SIIRTYMINEN

Voit avata valikon missä tahansa näytössä painamalla painiketta.

Voit siirtyä valikossa alas- ja ylöspäin painamalla ja painikkeita.

Voit avata valitsemasi valikkokohdan painamalla painiketta.

Vierityspalkki tulee näkyviin, jos valikossa on näytöllä näkyvien kohtien lisäksi myös muita kohtia.

Voit siirtyä valikossa alaspäin ja tarkastella muita kohtia painamalla painiketta.

Voit siirtyä valikossa takaisin ylös painamalla painiketta.

Voit palata takaisin edelliseen näkymään painamalla painiketta.

Voit palata **perusnäyttöön** pitämällä painiketta painettuna.

\*Käytettävissä vain, kun Sensori-toiminto on päällä.